


ACCUCHEK Mobile



PT
Breves instruções
 Guia de iniciação

ACCUCHEK

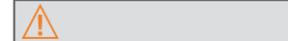

Estas breves instruções não substituem o manual de utilização na sua versão integral do seu sistema de monitorização da glicemia Accu-Chek Mobile. Leia atentamente e siga as notas de segurança constantes no manual de utilização e no folheto informativo da cassette de teste.

O dispositivo de punção e o aparelho destinam-se apenas a uso pessoal! Só podem ser utilizados por uma pessoa para realizar testes de glicemia. No caso de o aparelho de medição da glicemia ou o dispositivo de punção ser utilizado por outras pessoas ou por profissionais de saúde para realizar testes de glicemia em mais de uma pessoa, existe o risco de transmissão de infeções.

Vista geral: Aparelho de medição da glicemia, dispositivo de punção e cassette de teste

- 1 Botão de ejeção (armar e punccionar)
- 2 Visor das lancetas disponíveis
- 3 Patilha para a preparação de uma nova lanceta
- 4 Tampa rotativa para regular a profundidade de penetração
- 5 Campo de teste na extremidade da cassette
- 6 Botões para cima/para baixo
- 7 Botão ligar/desligar e botão de confirmação
- 8 Botão de desbloqueio para desenganchar o dispositivo de punção
- 9 Botão de desbloqueio para abrir a tampa do compartimento da cassette
- 10 Tampa de proteção da extremidade inferior

Cartucho de lancetas

Retire a cassette de teste nova do recipiente de plástico.

Colocar o sistema Accu-Chek Mobile em funcionamento

- 1 Abra totalmente a tampa de proteção da extremidade inferior até ao batente. Só agora pode abrir o compartimento da cassette e introduzir a cassette de teste.
- 2 Deslize o botão de desbloqueio da tampa do compartimento da cassette para cima. A tampa abre-se automaticamente.
- 3 Coloque uma nova cassette de teste no aparelho de medição da glicemia. Feche a tampa do compartimento da cassette e a tampa de proteção da extremidade inferior.
- 4 Retire a película de proteção das pilhas para trás para fora do aparelho de medição. Retire a película de proteção do visor.
- 5 Prima o botão aprox. 2 segundos até o aparelho de medição da glicemia se ligar. Com os botões selecione o idioma.
- 6 Prima o botão para definir o idioma desejado. Prima novamente o botão para confirmar o idioma selecionado.

Preparar o dispositivo de punção

- 1 Retire a tampa do dispositivo de punção.
- 2 Coloque um novo cartucho de lancetas (a extremidade branca primeiro). Dispõe agora de 6 lancetas estéreis. Não retire o cartucho de lancetas até todas as 6 lancetas terem sido utilizadas. Uma vez retirado do dispositivo de punção, o cartucho de lancetas não pode ser novamente introduzido.
- 3 Coloque novamente a tampa.
- 4 Rode a tampa até a profundidade de penetração desejada se encontrar no indicador. Comece por uma profundidade de penetração média, p. ex. 3.
- 5 Prepare o dispositivo de punção para a colheita de sangue seguinte: Desloque a patilha lateral na direção e novamente na direção .

0 que deve considerar

- 1 **Mãos limpas**
Lave as mãos com água quente e sabão e enxague bem com água limpa. Seque bem as mãos com uma toalha limpa.
- 2 **Gota de sangue claramente formada**
Utilize sempre uma gota de sangue pequena, fresca e claramente formada.
- 3 **Aplicar o sangue imediatamente**
Aplique o sangue imediatamente sobre o campo de teste depois de obter a gota de sangue. Não demore a aplicar a gota de sangue.
- 4 **Aplicar o sangue corretamente**
Toque levemente com a gota de sangue no centro do campo de teste. Não espalhe a gota de sangue no campo de teste.

Realizar um teste de glicemia

- 1 Abra a tampa de proteção da extremidade inferior. O aparelho liga-se.
- 2 Pressione com firmeza o dispositivo de punção contra o local de punção escolhido. Empurre depois o botão de ejeção totalmente para baixo.
- 3 Toque levemente com a gota de sangue no centro do campo de teste. Retire o dedo do campo de teste quando aparecer *Teste em curso* no visor.
- 4 O teste fica concluído em, aproximadamente, 5 segundos. Leia o resultado e feche a tampa de proteção da extremidade inferior. O aparelho desliga.

Assistência a Clientes

Roche Sistemas de Diagnósticos, Lda.
 Estrada Nacional, 249-1
 2720-413 Amadora, Portugal
 Linha de Assistência a Clientes 800 200 265
 (dias úteis: 8h30 – 18h30)
 www.accu-chek.pt

Última atualização: 2014-01

CE 0088

ACCUCHEK, ACCUCHEK MOBILE e FASTCLIX são marcas da Roche.

© 2014 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH
 Sandhofer Strasse 116
 68305 Mannheim, Germany
 www.accu-chek.com